

**Назначение:**

Хромовоквасцовый клей для срезов «Медикс» предназначен для приклеивания к предметному стеклу парафиновых срезов из тканей, фиксированных формалином и подлежащих гистологическому исследованию, а также гистохимическим методам исследования.

**Характеристика и состав:**

Хромовоквасцовый клей для срезов «Медикс» - Прозрачная сине-зеленого цвета однородная жидкость без запаха. Представляет собой водный раствор желатина и хромовых квасцов.

**Меры предосторожности:**

Не желательно попадание хромовоквасцового клея для срезов «Медикс» на кожу и слизистые оболочки человека. При попадании обильно промыть проточной водой и обратиться за медицинской помощью, если необходимо.

**Анализируемые образцы:**

Парафиновые срезы тканей человека, подлежащие монтированию на предметное стекло.

**Информация о предполагаемом пользователе:**

Реагент должен использоваться исключительно квалифицированным и подготовленным персоналом. Согласно ГОСТ ISO 14971-2011 данные медицинские изделия для диагностики *in vitro*, предназначенные для лабораторных исследований предназначены для двух пользователей: медицинского работника, проводящего исследование, и медицинского работника, получающего результаты, интерпретирующего их и действующего на их основании.

**Проведение анализа:**

Нанести очень малую каплю адгезива на чистое и сухое предметное стекло и равномерно размазать по поверхности. Дать высохнуть в течение 10-15 сек. Не использовать для ИГХ и гистохимических методов, где этого оговорено инструкциями.

Можно капнуть 10-20 капель адгезива во флотационную ванну для срезов и хорошо перемешать. Жидкость вылить по окончании работы.

**Результаты:**

Результаты измеряются качественно наблюдателем. На результаты могут влиять многочисленные факторы, которые не рассматриваются в данных методических рекомендациях.

**Условия хранения, транспортирования и эксплуатации реагентов:**

Хромовоквасцовый клей для срезов «Медикс» должен храниться при температуре +10 – +25°C, в течение одного года. По истечении данного периода возможно сохранение свойств, если при перевозке и работе не нарушался температурный режим. Заключение о пригодности реагента делается патологом, исследующим материал.

Срок годности - 12 месяцев.

Реагент хранят в упаковке изготовителя в закрытых отапливаемых складских помещениях с обеспечением защиты от атмосферных осадков, вдали от прямого солнечного света.

**Утилизация:**

Хромовоквасцовый клей для срезов «Медикс» утилизируется или уничтожается как класс Г по СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В случае, если исходное сырье не отвечает требованиям нормативной технической документации, то оно либо возвращается производителю, при не истекшем гарантийном сроке, либо, после истечения гарантийного срока, отправляется на утилизацию. Красители, входящие в состав набора (4 класс опасности отходов), с истекшим гарантийным сроком хранения и не отвечающие требованиям ТУ, согласно договора между производителем и заказчиком либо возвращается производителю, либо отправляется на утилизацию по договору со специальными организациями, имеющими лицензию на обращение с промышленными отходами. в места, согласованные с Роспотребнадзором.

Не допускается загрязнение отходами производства почвы и водоемов.

**Гарантийные обязательства:**

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям нормативной и технической документации.

Безопасность и качество изделия гарантируются в течение всего срока годности.

Производитель отвечает за недостатки изделия, за исключением дефектов, возникших вследствие нарушения правил пользования, условий транспортирования и хранения, либо действия третьих лиц, либо непреодолимой силы.

Производитель обязуется за свой счет заменить изделие, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не соответствуют нормативной и технической документации, если указанные недостатки явились следствием скрытого дефекта материалов или некачественного изготовления изделия производителем.

По вопросам качества следует обращаться в ООО «Медикс» по адресу: [as@medixlab.ru](mailto:as@medixlab.ru)

Также электронная версия инструкции по применению размещена в сети интернет по адресу: [www.medixlab.ru](http://www.medixlab.ru) в разделе «инструкции».